

# BIOCREDIT COVID-19 Ag


## SARS-CoV 2 Test Antigene

- » La prima commercializzazione della tecnologia Black Gold Particle nel mondo (alta sensibilità e specificità)
- » Sistema a due colori facile da usare (linea di controllo: rosso, linea di test: nero)
- » Tempo di test rapido (5 ~ 8 minuti)
- » Rilevazione semplice dell'antigene SARS-CoV2

### Tecnologia di base Black Gold Particle



Tecnologia del coniugato oro-nero differenziato

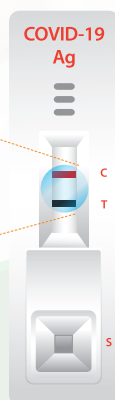

Sistema a doppio colore

Test in 8 minuti!



## BIOCREDIT COVID-19 Ag kit test rapido

Destinazione d'uso	Rilevazione di antigeni SARS-CoV2
Confezione	20 Test a scatola
Storage	1 ~ 40°C
Tipo di campione	Rinofaringe / Rinofaringea
Scadenza	24 mesi dalla produzione
Tempo risultato	5~8 minuti

# COVID-19 Test Diagnostico Rapido

Ogni singolo test ha il reagente già dispensato nella provetta di raccolta

- Facilissimo da usare
- Riduce rischi di contaminazione

## PROCEDURA


Inserire il tampone con il campione e agitare per 5-10 volte

Rimuovere il tampone mentre si preme delicatamente la testa del tampone

Chiudere la provetta del diluente col tappo fornito

Capovolgere la provetta del diluente e strizzarla per mettere 3-4 gocce (90-150 µL) nel pozzetto

Leggere il risultato entro 5~8 minuti

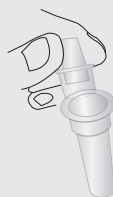

## INTERPRETAZIONE

NEGATIVO




Una linea Rossa "C"

POSITIVO



Linea Nera "T" e Linea Rossa "C"

INVALIDO

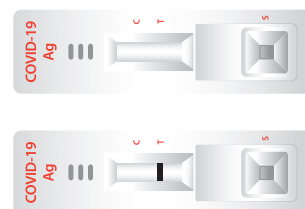


Non appare la linea "C". Ripetere il test



Per informazioni commerciali contattare  
+39 02 36708989 - [info@biott.eu](mailto:info@biott.eu) - [www.biott.eu](http://www.biott.eu)



RapiGEN, Inc.  
3-4F, 16, LS-ro 91beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si,  
Gyeonggi-do, 14119, Republic of Korea

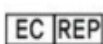

MT Promed  
Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80.66386 St.Ingbert, Germany TEL :  
+49-6894-581020 FAX : +49-6894-581021  
Email : [info@mt-procons.com](mailto:info@mt-procons.com) [www.mt-procons.com](http://www.mt-procons.com)